

Vivinex™ multiSert™


Preloaded Injektorsystem mit Vivinex™-IOL

Modell **XC1-SP, XY1-SP, XY1A-SP, XY1-EM, XY1-G(T)** oder **XY1-GP(T)**




Fixationsbrücke und Transportbehälter sind mit den Zahlen ①, ② und ③ markiert und zeigen die Reihenfolge der einzelnen Schritte.

Schritt A

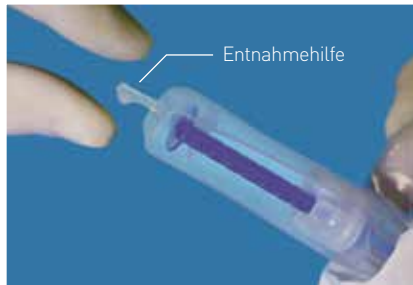


Ziehen Sie den Injektor an der Entnahmhilfe aus der Sterilverpackung.

Schritt B

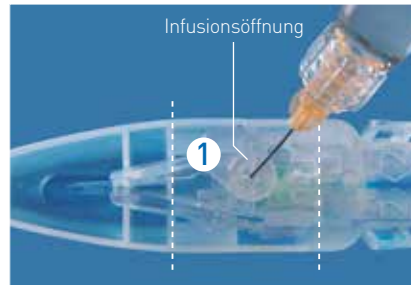

Füllen Sie Natriumhyaluronat (OVD) durch die Infusionsöffnung in den Injektor ein. Füllen Sie den gesamten Bereich innerhalb der gestrichelten Linien mit OVD aus und vergewissern Sie sich, dass die gesamte Optik mit OVD bedeckt ist.

Schritt C

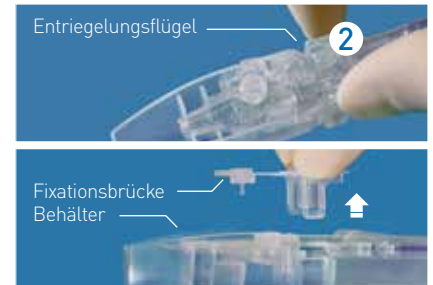

Drücken Sie die Entriegelungsflügel zusammen und heben Sie die Fixationsbrücke vom Injektorbehälter ab.

Schritt D



Fixieren Sie das Injektorgehäuse mit Ihrem Daumen und schieben Sie den Schlitten langsam und gleichmäßig in ungefähr 3 Sekunden bis zum Anschlag. Üben Sie dabei weder Druck nach unten noch nach oben aus.

Schritt E



Entnehmen Sie den Injektor aus dem Behälter. Fahren Sie unverzüglich mit Schritt F fort.

Schritt F



Drücken Sie den Kolben vorsichtig und in einer sanften, kontinuierlichen Bewegung nach vorn, bis die korrekte Faltung und Position der Haptiken erreicht ist. *Der Vorschub des Kolbens sollte etwa 5 Sekunden dauern.

Vergewissern Sie sich, dass sowohl die vordere wie auch die hintere Haptik korrekt gefaltet sind, während die IOL vorgeschoben wird. Die Schubstange sollte mittig am Optikrand ansetzen.


4-in-1 multiSert™ bietet maximale Kontrolle durch verschiedene Anwendungsoptionen

Schritt G




Optionen für die Einführtiefe der Injektorspitze

Einführung in den Kapselsack

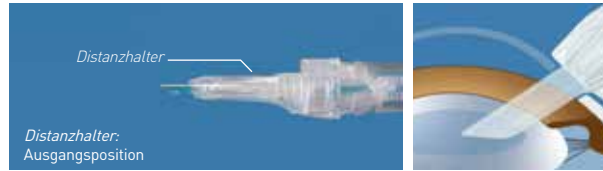


Verwenden Sie den Injektor, ohne dass die Ausgangsposition des *Distanzhalter*s geändert wird. Halten Sie den Schlitz der Injektorspitze nach unten, bevor Sie ihn durch die Inzision in das Auge einführen.

Einführung durch den Inzisionskanal

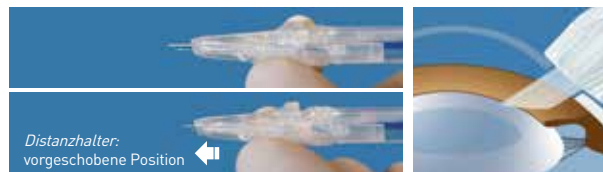

Halten Sie das Injektorgehäuse und schieben Sie den *Distanzhalter* vorsichtig nach vorne, bis er mit einem Klicken in der finalen Position einrastet. Halten Sie den Schlitz der Injektorspitze nach unten, bevor Sie ihn durch die Inzision in das Auge einführen. Führen Sie die Injektorspitze bis zu dem *Distanzhalter* ein.

multiSert™

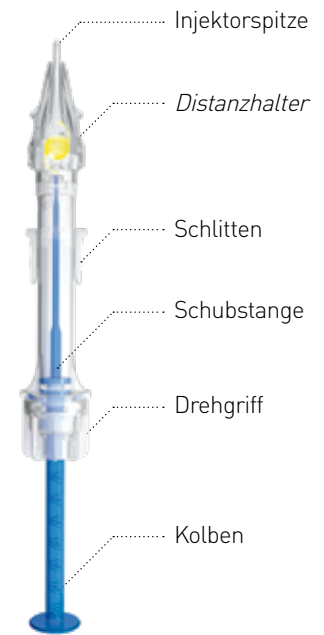

Schritt H




Optionen für die IOL-Implantation

Einhändige Push-Injektion



Drücken Sie den Kolben langsam nach vorne, um die IOL in den Kapselsack zu injizieren.

Beidhändige Dreh-Injektion

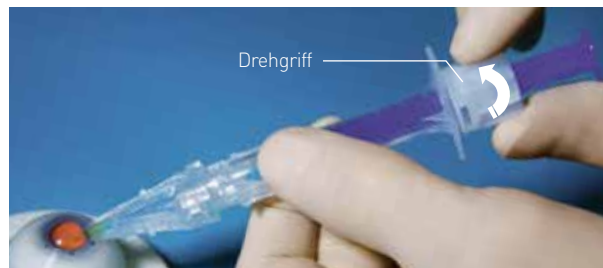

Drehen Sie den Drehgriff langsam im Uhrzeigersinn, um die IOL in den Kapselsack zu injizieren.

! Für beide IOL-Implantationsoptionen gilt:

Ziehen Sie den Kolben während des Vorschiebens NICHT zurück. Drehen Sie den Drehgriff NICHT zurück bzw. gegen den Uhrzeigersinn! Eine Rotation des Injektors ist NICHT nötig.