

Mezotix™

die neue innovative Technologie zur fraktionierten Hauterneuerung

Mezotix™ ist eine neuartige, revolutionäre Anti-Aging-Methode mit einer nahezu gleichen Wirkungskraft eines Lasers. Schnell, effektiv, beinahe schmerzfrei und ohne Ausfallzeiten. Das neuartige, fraktionierte, nicht-ablative System zur Hauterneuerung bringt Wärme in die tiefen Schichten der Haut und lässt Falten und Narben nachweislich verschwinden. von Stefan Koller

WAS IST DAS MEZOTIX™?

Das Mezotix™ ist ein neuartiges, fraktionsiertes, nicht-ablatives System zur Hauterneuerung, basierend auf der ganz neu entwickelten patentierten Titan-Tip-Technologie. Mezotix™ ist kein Laser, keine Radiofrequenz, keine Nadel und ist mit anderen derzeit verfügbaren Technologien nicht vergleichbar. Mezotix™ arbeitet mit reiner, natürlicher Hitze und ist strahlungsfrei.


WIE WIRKT DAS MEZOTIX™?

Es dient der sicheren und optimalen Behandlung des Gesichts, einschließlich der periorbitalen Region und der Augenlider, sowie auch des Halses und Dekolletés. Es geht einher mit einem hohen Komfort für die Kundinnen und Kunden, das heißt es ist trotz der hohen Effizienz sehr schmerzarm. Darüber hinaus sind auch Körperbehandlungen möglich.

Wichtig zu wissen: Mezotix™ arbeitet fraktioniert, nicht flächig. Es verändert an den Fraktionspunkten durch die einwirkende Hitze die Struktur des Stratum Corneum und verdunstet das Wasser in den oberen Hautschichten. Somit wird die Haut an den Fraktionspunkten optimal vorbereitet und ist äußerst aufnahmefähig für die Behandlung zur




Mezotix™ arbeitet mit
reiner, natürlicher Hitze
und ist strahlungsfrei.

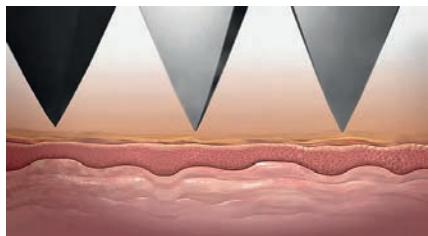


1. Vor der Berührung

Die Titanpyramiden werden auf 400°C erhitzt und auf den Kontakt mit der desinfizierten Haut vorbereitet.

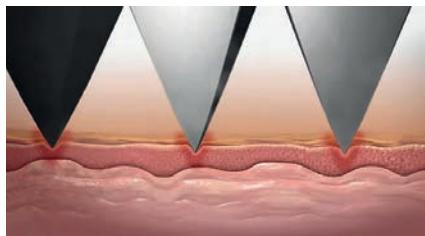

2. Während der Berührung

Die Titanpyramiden berühren für Millisekunden die Haut und weichen anschließend sofort wieder zurück.

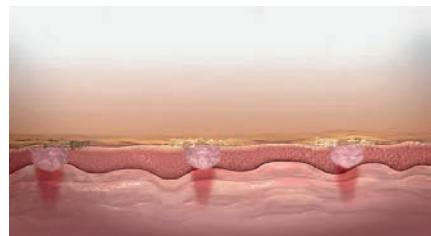

3. Nach der Berührung

In die offenen Kanäle werden hochdosierte Wirkstoffe eingeschleust. In der Tiefe werden neue Kollagenfasern und Zellen gebildet.

Nachpflege mit hydratisierenden Substanzen und anderen Wirkstoffen.^{1,2)} Gleichzeitig wird das Kollagen ganz gezielt durch die tiefgehende Wärme zur Regeneration angeregt, wodurch sich das Gewebe strafft. Die Heilung ist schnell und die Ausfallzeit kurz.

WO KANN DAS MEZOTIX™ ANGEWENDET WERDEN?

- Falten und feine Linien²⁾
- Hautverfärbungen
- Sonnengeschädigte Haut
- Hautton und Hauttextur verbessern
- Straffung der Oberlider²⁾
- Akne
- Pigment-/Altersflecken
- Narben/Aknenarben
- Striae, Schwangerschaftsstreifen

Das Mezotix™ ist stark in der Kombination respektive für die Behandlung zur Nachpflege mit hydratisierenden Substanzen und Wirkstoffen im Gesicht, am Hals, Dekolleté und am ganzen Körper.

KUNDENVORTEILE

- Nahezu schmerzfrei
- Langanhaltende Ergebnisse
- Keine Ausfallzeit
- Kurze Behandlungsdauer
- Keine Nebenwirkungen



Zum Autor

Stefan Linus Koller ist CEO und Sales Director der LASERMED AG – Innovating Medicine (Teil der Medical Vision Gruppe) und Dozent an verschiedenen Institutionen (z. B. Laserschutz). www.lasermed.ch



Vorher-Nachher-Aufnahme einer Mezotix™-Behandlung

- Model weiblich, 66 Jahre
- Hautverbesserungszustand (unten) nach 7 Monaten und 4 Behandlungen
- 1 Tag Ausfallzeit
- keine topische Anästhesie

Vorher-Nachher-Aufnahme einer Mezotix™-Behandlung


- Model weiblich, 57 Jahre
- Hautverbesserungszustand (unten) nach 1 Jahr und 4 Behandlungen
- 1 Tag Ausfallzeit
- keine topische Anästhesie

Vorher-Nachher-Aufnahme einer Mezotix™-Behandlung

- Model weiblich, 22 Jahre
- Hautverbesserungszustand (unten) nach 4 Wochen und 3 Behandlungen
- keine Ausfallzeit
- keine topische Anästhesie

Welche Technologie steckt hinter Mezotix?

Das Mezotix™ basiert auf einer ganz neuen Technologie mit dem Namen Thermo-Mechanische Ablation, kurz TMA. Dabei wird reine Hitze schnell und sicher auf die Haut übertragen durch sehr kurzen Kontakt. Der thermische Effekt induziert die Erneuerung von Epidermiszellen und Regeneration von Kollagen in der Dermis.

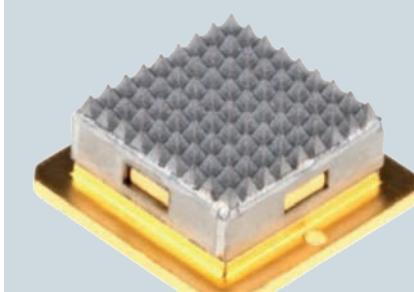

Thermo-fraktionierter Tip aus Titan
(9x9 Pyramiden per 1 cm²)



Ansicht des Tips im Handstück während einer Behandlung

Wissenschaftliche Studien:

- 1) A New Method for Percutaneous Drug Delivery by Thermo-Mechanical Fractional Injury. Ronen Shavit, MSc and Christine Dierickx, MD
- 2) A Novel Thermo-mechanical System Enhanced Transdermal Delivery of Hydrophilic Active Agents by Fractional Ablation. Amnon C. Sintov, Maja A. Hofmann
- 3) A Prospective Study of the Safety and Efficacy of a Thermo-Mechanical Fractional Ablative Device for Periorbital Rejuvenation in Asians. Kwankamol Woottisheattpapboon, M.D., Woraphong Manuskiatti, M.D., Nudpanuda Tevechodperathum, M.D.